



日常点検表

点検年月

年 月

点検担当者

カーディアックレスキュー RQ-5000

製造番号

パッドカートリッジ 使用期限 年 月 日迄

予備パッドカートリッジ 有 無 使用期限 年 月 日迄

正常な状態を確認しましたら印をつけてください。

AEDの状態はコントロールパネルのランプにてご確認いただけます。

正常な場合



ランプが1つのみ緑色に点滅している

異常がある場合

その他のランプが点滅している

→異常がありましたら販売店もしくは日本ライフライン AED コールセンター (0120-001-332) にご連絡ください。



1日		11日		21日	
2日		12日		22日	
3日		13日		23日	
4日		14日		24日	
5日		15日		25日	
6日		16日		26日	
7日		17日		27日	
8日		18日		28日	
9日		19日		29日	
10日		20日		30日	
				31日	

・異常内容は、取扱説明書か、手動セルフテストを実施していただいた後の音声案内でご確認いただけます。

手動セルフテスト

電気ショックボタンと小児モードボタンを同時に長押しする事で手動セルフテストが行えます。手動セルフテストでは「ランプ」と「音声」でAEDの状態をお知らせします。

手動セルフテストは以下の場合に有用です。

- ・落下などで衝撃が加わった際や、水に濡れた際に異常がないかどうかをすぐに確認したい場合
- ・異常内容を音声で確認したい場合
- ・点検の履歴を残したい場合（テストを行なった時間をデータマネジメントソフトで確認できます）

※この日常点検表は、コピーするか、下記のウェブサイトよりダウンロードしてお使いください。
www.aed-rescue.com