



カーディアックレスキュー AED 日常点検表

点検年月

年 月

点検担当者

モデル番号 RQ-

製造番号

パッドカートリッジ

使用期限

年

月

日迄

予備パッドカートリッジ

有 無

使用期限

年

月

日迄

正常な状態を確認しましたら 印をつけてください。

AED の状態はコントロールパネルのランプにて
ご確認いただけます。

正常な場合




ランプが1つのみ緑色に点滅している

異常がある場合

その他のランプが点滅している

→ 異常がありましたら販売店もしくは
日本ライフライン AED コールセンター
(0120-001-332) にご連絡ください。

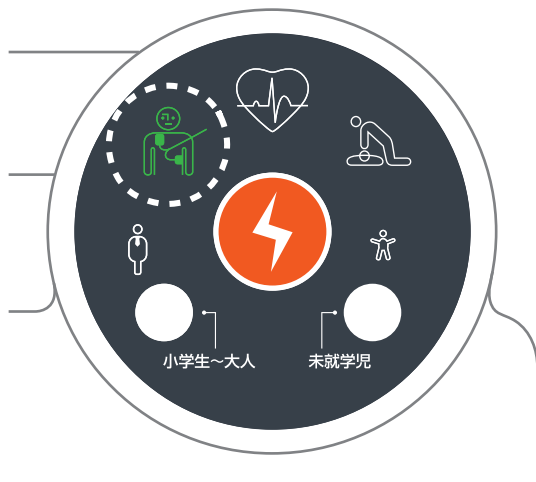

1日

11日

21日

2日

12日

22日

3日

13日

23日

4日

14日

24日

5日

15日

25日

6日

16日

26日

7日

17日

27日

8日

18日

28日

9日

19日

29日

10日

20日

30日

31日

・異常内容は、取扱説明書か、手動セルフテストを実施していただいた後の音声案内でご確認いただけます。

手動セルフテスト

電気ショックボタンと未就学児モードボタンを同時に長押しする事で手動セルフテストが行えます。
手動セルフテストでは「ランプ」と「音声」で AED の状態をお知らせします。

手動セルフテストは以下の場合に有効です。

- ・落下などで衝撃が加わった際や、水に濡れた際に異常がないかどうかをすぐに確認したい場合
- ・異常内容を音声で確認したい場合
- ・点検の履歴を残したい場合（テストを行なった時間をデータマネジメントソフトで確認できます）

※この日常点検表は、コピーするか、下記のウェブサイトよりダウンロードしてお使いください。

www.aed-rescue.com